

Dräger X-plore® 1900

Anlegeanleitung



D-8184-2018

91 06 734 | 19.01-1 | HQ | PP | Änderungen vorbehalten | © 2019 Drägerwerk AG & Co. KGaA



D-16667-2018

Halten Sie die Maske in einer Hand. Stellen Sie die untere Schlaufe der Bänderung weit, so dass die obere Schlaufe fast an der Halbmaske anliegt.



D-16684-2018

Falten Sie die Halbmaske auf und formen Sie den Nasenclip in der Mitte leicht vor.



D-16704-2018

Platzieren Sie die Maske unter dem Kinn und über der Nase. Ziehen Sie die untere Schlaufe über den Kopf in den Nacken.



D-16712-2018

Legen Sie die obere Schlaufe hoch auf dem Hinterkopf an.



D-16723-2018

Passen Sie die Länge der Schlaufen so an, dass die Maske angenehm auf dem Kopf sitzt und die Spannung gleichmäßig verteilt ist.



D-16729-2018

Passen Sie den Nasenclip mit beiden Händen an die Nasenkontur an.



D-16733-2018

Um den Dichtsitz zu prüfen, umfassen Sie die Halbmaske mit beiden Händen und halten Sie ggf. das Ausatemventil dicht. Atmen Sie kräftig aus.



D-16743-2018 / D-16747-2018

Sollte Luft im Nasenbereich entweichen, passen Sie den Nasenclip erneut an. Sollte Luft an den Rändern entweichen, rücken Sie die Maske zurecht und überprüfen Sie den Sitz der Bänder am Kopf.



D-16756-2018

Einsatzbereit